




БРУСЬЯ НАСТЕННЫЕ

Артикул: G294

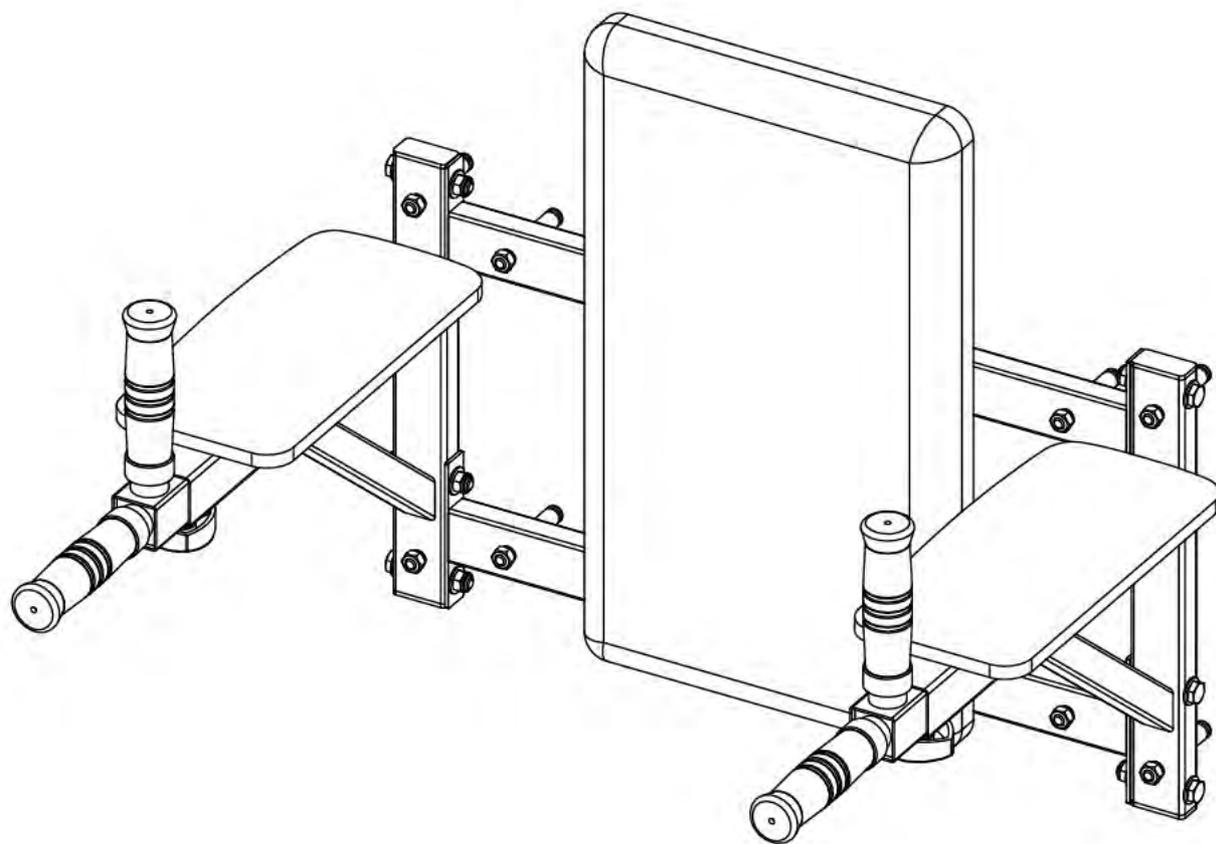

Инструкция по сборке

ТУРНИК НАСТЕННЫЙ

- ① Болт М8*50 - 4 шт.
- ② Шайба М8 - 8 шт.
- ③ Гайка М8 - 8 шт.
- ④ Болт М8*55 - 8 шт.
- ⑤ Регулировочная ручка М8 - 2 шт.



- ⑥ Шайба М8 - 2 шт.



- ⑦ Распорный болт М8 - 8 шт.




- ⑧ Крепёжная конструкция - 2 шт.



- ⑨ Ручка - 2 шт.



- ⑩ Подлокотник - 2 шт.

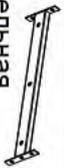

- ⑪ Соединительная перекладина - 2 шт.




- ⑫ Спинка - 1 шт.

Шаг 1.


Установите на крепёжную конструкцию (А) подлокотник (С) и закрепите его с помощью двух комплектов деталей: болтов (1) и шайб (2).

Затем подсоедините к конструкции ручку (В), отрегулируйте её положение и зафиксируйте с помощью регулировочной ручки (5).

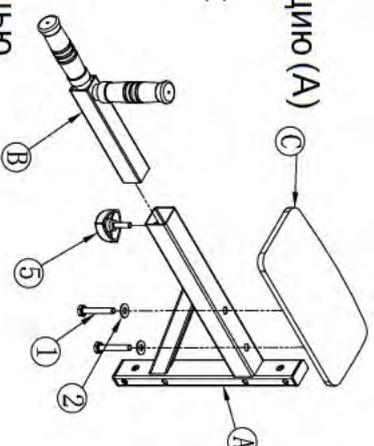


Шаг 2.

Повторите действия из шага 1 для сборки второй опорной конструкции.

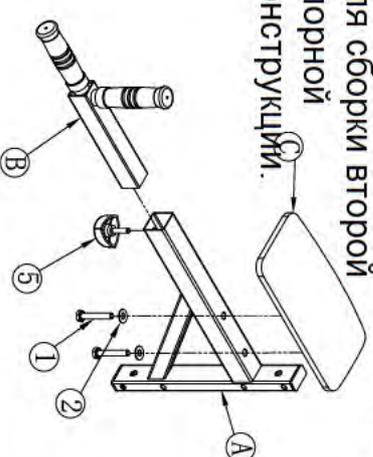


Шаг 3.

Соедините две опорные конструкции, установив между ними соединительные перекладины (D), после чего закрепите детали с помощью болтов (4), шайб (2) и гаек (3) в соответствии с рисунком справа. Затяните крепежи. Подсоедините к конструкции спинку (Е) и закрепите её с помощью болтов (6).

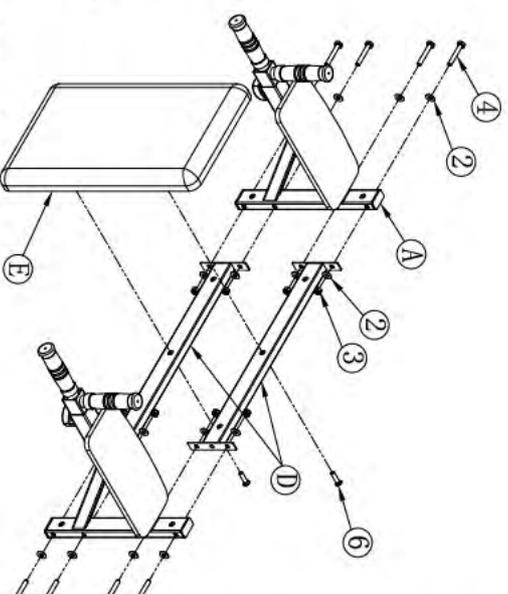


Шаг 4.

Просверлите в стене 8 отверстий, затем установите тренажёр таким образом, чтобы отверстия в стене и турнике были совмещены. Прикрепите турник к стене с помощью распорных анкерных болтов (7).

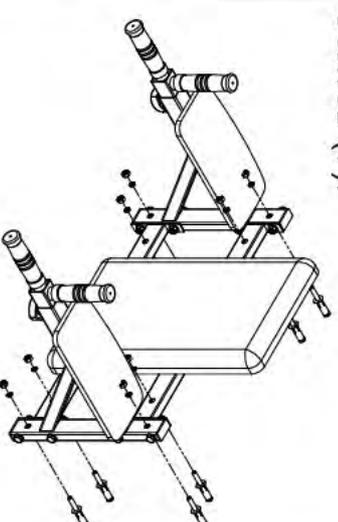


Гайка (M8)

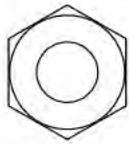


8 шт.

Шайба (φ8)

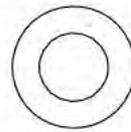


20 шт.

Болт (M8*55)

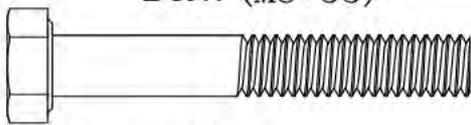


8 шт.

Болт (M8*50)

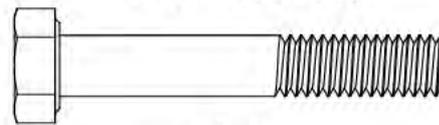


4 шт.

Распорный анкерный болт

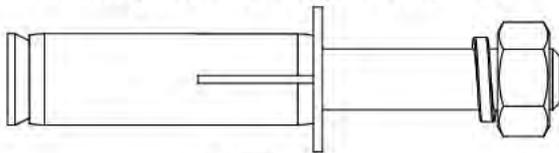


8 шт.

Болт (M8*30)

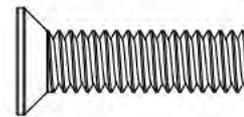


2 шт.

Регулировочная ручка (M8)

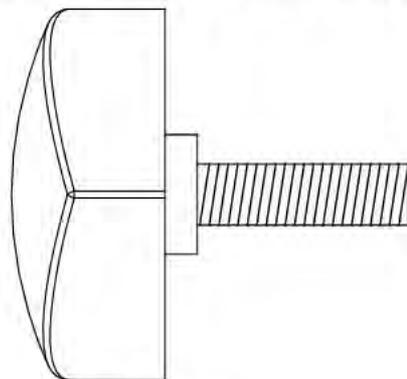



2 шт.

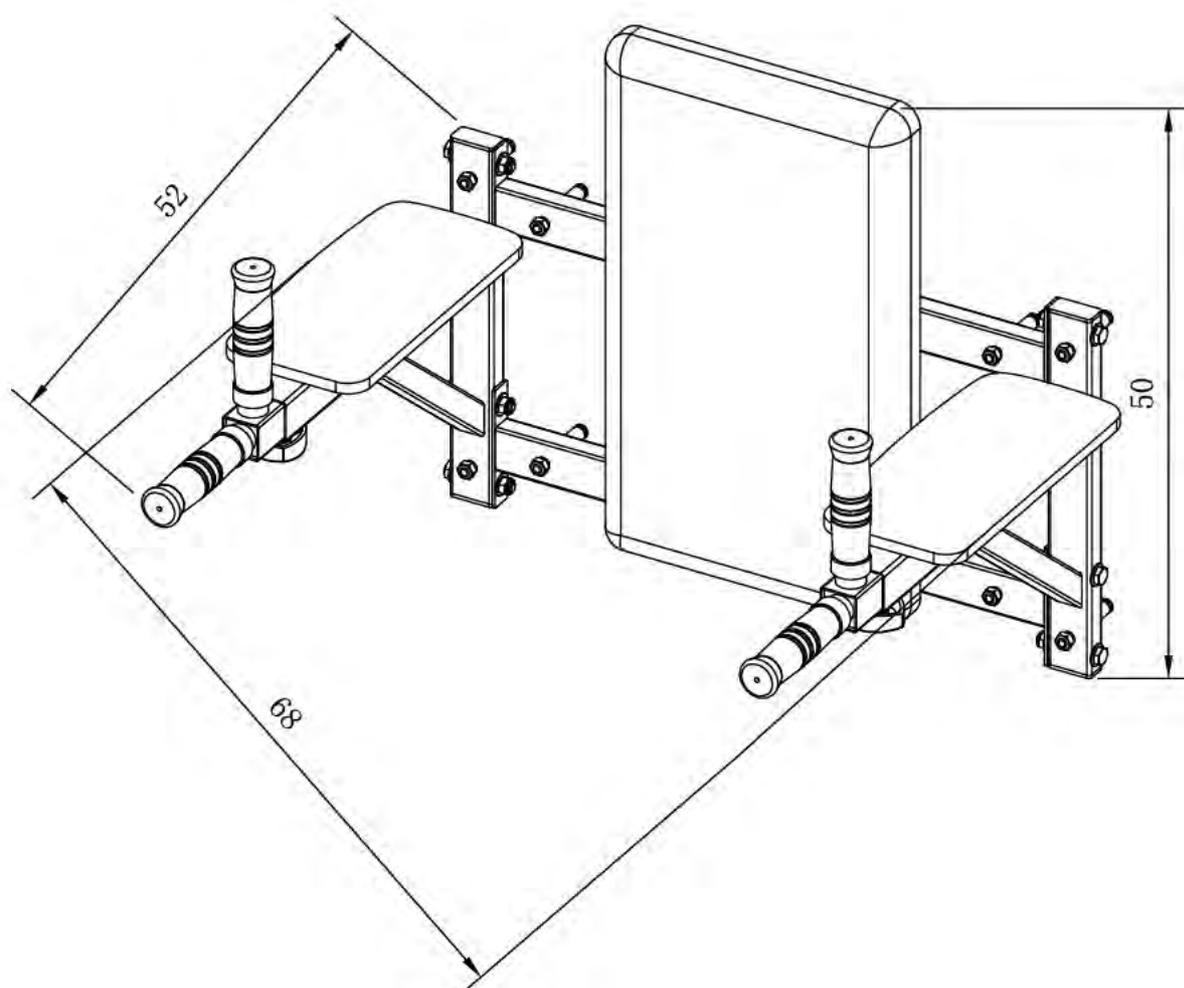

Габариты: 68 см x 52 см x 50 см

Максимально допустимая нагрузка: 200 кг


2

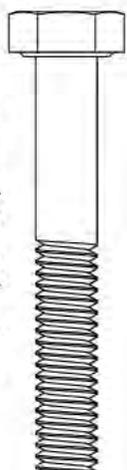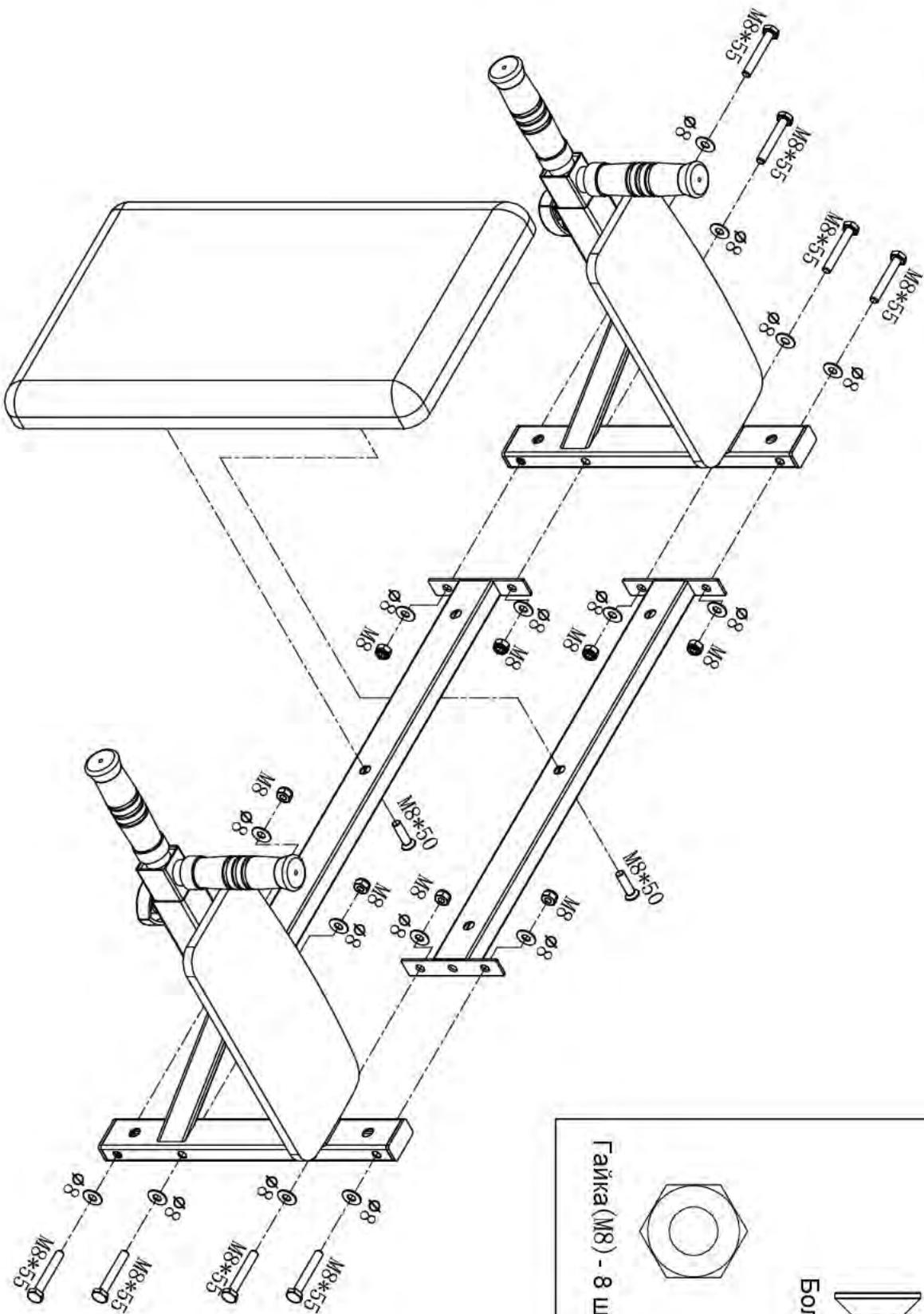


Болт (M8*55) - 8 шт.



Болт (M8*30) - 2 шт.

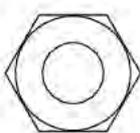

Гайка (M8) - 8 шт.

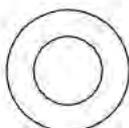

Шайба (Ø8) - 16 шт.

