



Инструкция по эксплуатации\*

**XS 305**



## Назначение

Ходунки Ortonica XS 305 предназначены для передвижения людей с нарушениями опорно-двигательной системы в домашних условиях и во время прогулок на улице. Использование ходунков улучшает координацию движений, позволяет сохранить равновесие и уменьшает нагрузку на нижние конечности.

Ходунки изготовлены из легкого и прочного алюминиевого сплава, имеют высококачественное покрытие, складываются и раскладываются без инструмента.



Для безопасной и приятной эксплуатации компания Ortonica рекомендует подробно ознакомиться с данным руководством пользователя.

## Показания

- Болезни системы кровообращения, органов дыхания, органов пищеварения, мочеполовой системы.
- Умеренные и выраженные явления гемипареза.
- Реабилитация после операций, травм и переломов конечностей.
- Заболевания опорно-двигательного аппарата.

## Противопоказания

- Психические расстройства.
- Потеря функциональности обеих рук.
- Нарушения статики и координации движения.
- Тяжелые нарушения вестибулярного аппарата.
- Ограниченная или недостаточная способность к ориентации.
- Наркотическое или алкогольное воздействие.



## Меры предосторожности

- Никогда не пытайтесь подняться по лестнице или эскалатору с ходунками.
- Не переносите весь вес тела на одну сторону рамы - ходунки могут опрокинуться.
- С осторожностью перемещайтесь по мокрым и скользким поверхностям.
- Не используйте ходунки, если не уверены в их исправности.
- Нельзя использовать ходунки при головокружении.
- Старайтесь поддерживать максимально ровное положение спины и всего тела – держать осанку.
- При ходьбе необходимо смотреть вперед, не акцентируя внимание на ходунках.
- Передвижение с помощью ходунков должно происходить только под присмотром взрослых

## Технические характеристики

Параметры**	XS 305
Габариты (ДхШхВ), ( $\pm 1$ см)	47x54x75-95
Ширина между ручками, ( $\pm 1$ см)	44
Грузоподъемность, ( $\pm 5\%$ ), кг	100
Масса (нетто/брутто), ( $\pm 5\%$ ), кг	2,45
Количество штук в упаковке	1

### Комплектация

- Ходунки 1 шт.;
- Руководство 1 шт.

### Подготовка к эксплуатации

1. Разложите раму.
2. Проверьте ходовые качества ходунков.
3. Отрегулируйте высоту ножек.

## Сведения о сертификации

Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/4717  
Производитель: «Гуандун Даянг Медикал Технолоджи Ко., Лтд.», Китай

Guangdong Dayang Medical Technology Co., Ltd., Xingxian Development Zone, Changhongling Industrial Park (2nd Phase), Dali, Nanhai District, 528234 Foshan, Guangdong, China

**Гарантийный срок:** 12 месяцев с даты продажи.

Импортер в России:

ООО «Медрус»

Адрес : 394026, г. Воронеж, Московский пр-т, 11

Тел: +7 (473) 300-31-91

По вопросам гарантийного обслуживания Вы можете обратиться по телефону: 8-800-707-44-52

[www.ortonica.ru](http://www.ortonica.ru)

Дата продажи	Подпись продавца / Поставщика

\* Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных от 11.05.2018 г.

\*\*Производитель оставляет за собой право вносить изменение в конструкцию изделий, не ухудшающие потребительские свойства.





8 800 500-14-14

[ortonica.ru](http://ortonica.ru)